

用户的声音

有了外出的欲望

使用 DFree 前

由于担心自己总是很快想去厕所，对排尿感到不安。因此不常外出也控制了饮水量。



使用 DFree 后

从获取的数据中发现就算喝了水，尿也可以储放 2-3 小时。因此可以重新安心出门了。

70多岁 女性

外出时也能安心上厕所

使用 DFree 前

因为事故失去了感知尿意的能力。虽然在使用导尿，但由于不知道什么时候会有尿意，对外出感到不安。



使用 DFree 后

更加了解自己什么时候想去厕所。外出时也不再为上厕所的准备而担忧了。

40多岁 男性

给如厕训练创造了机会

使用 DFree 前

由于孩子发育不良，如厕训练没能成功脱离尿布。



使用 DFree 后

由于了解什么时候应该带孩子去厕所，能够更加乐观面对孩子的如厕训练了。

30多岁 女性

夜间也能安心上厕所

使用 DFree 前

虽然在照顾着 80 来岁的父亲，但晚上父亲却由于想去厕所一个人从床上起身，摔倒了数次。



使用 DFree 后

由于了解到了晚上什么时候应该带父亲去厕所，没再发生父亲一个人起床摔倒的意外。

50多岁 男性

商品信息



DFree 主体 (DFree-U1P)



USB 充电线



超声波凝胶 (60ml)



穿着用胶布 (50mm x 7m)

商品名：DFree-U1P

商品说明

尺寸	主体：W83 x D60 x H33(mm) 感应器：W54 x D35 x H12(mm)	运作时间	约 24 小时 (充满电需要约 4 小时)
重量	90g	附属品	超声波凝胶, 穿着用胶布
电源	锂电池	通信方式	Bluetooth 4.1

DFree 起步者套餐

49,880 日元 (非含税)



购买方式

网络订购

<https://personal.dfree.biz/>

电话订购

050-3205-0810

DFree

搜索



咨询服务

如遇到无法取得数据，不知道如何使用产品等问题时请参考 <https://triplew.zendesk.com/>

制造商 Triple W Japan 股份公司

〒100-0006

东京都千代田区有乐町 1-5-2 东宝双塔大厦 3 楼

<https://dfree.biz>

sp-jp@www-biz.co

050-3205-0810 客服时间：10:00~19:00 周一至周五（节假日，年底，年初以外）

提前告知去厕所的时间!

D Free



✓APP会发送上厕所的时机通知

✓实时确认膀胱的状态

✓记录功能让历史数据可视化



制造商 Triple W Japan 股份公司

如果您有这些烦恼…

- 厕所在近处却常感不安
- 不知道该什么时候导尿
- 因为没有尿意所以想知道膀胱的膨胀度

用 DFree 就能实时
确认膀胱的状态



- 突然感到尿意来不及去厕所
- 不知道应该什么时候带去厕所
- 外出找不到厕所时感到不安

用 DFree 就能知道
什么时候该去厕所



DFree 能做到的事

让对排尿感到的看不到的 不安为看得到的安心

- ✓ 用 APP 显示膀胱的状态
- ✓ 告知上厕所的时机
- ✓ 外出时也能穿戴
- ✓ 保存排泄的记录




关于 DFree

DFree 的构造

用超音波测算
膀胱的膨胀度

与手机联动

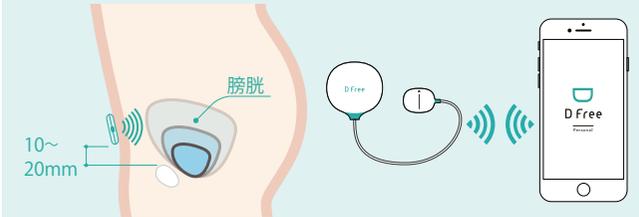

※以下用户可能无法获得数据※

- 下腹部脂肪厚的人
- 下腹部皮肤极度松弛的人
- 无法存放尿的人
- 下腹部有大面积手术痕迹的人
- 因为皮肤发红，皮疹而不能使用的人
- 怀孕中的人
- 未入学儿童等低龄儿童
- 狗或猫等动物

APP 机能 (使用时需要专用 APP)

告知排尿时机 显示尿的储存量 确认并分析
排尿记录



※可用 OS 系统为 iOS10.0 以上, Android 4.4 以上